



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

DE

NUR EIN EINFACHER SPRÜHSTOSS FÜR EINE WIRKSAME OHRENHYGIENE

AUDISPRAY ADULT ein 100% natürliches Produkt

AUDISPRAY ADULT enthält eine hypertone, mikrobiologisch kontrollierte Meerwasserlösung. AUDISPRAY ADULT ist eine Alternative zu Wattestäbchen.

Was ist AUDISPRAY ADULT?

AUDISPRAY ADULT weicht und löst das Ohrenschmalz auf und fördert so die natürliche Ausscheidung nach aussen, Richtung Ohrmuschel. Regelmäßig angewendet beugt AUDISPRAY ADULT der Ansammlung von Ohrenschmalz und Verunreinigungen im Gehörgang vor. AUDISPRAY ADULT enthält kein Treibgas und ist mit einem Überdruckschutz am Sprühkopf ausgestattet, der eine regelmäßige und wirksame Reinigung ermöglicht.

Wer kann AUDISPRAY ADULT verwenden?

Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 1 bis 2 Sprühstöße pro Ohr zweimal wöchentlich. Bei **Trägern von Hörgeräten** empfiehlt es sich, AUDISPRAY ADULT jeden Abend nach dem Entfernen des Hörgeräts anzuwenden, damit das Ohrenschmalz die Funktionsfähigkeit des Hörgeräts nicht beeinträchtigt.

Wie wird AUDISPRAY ADULT angewendet?

1. Setzen sie den Sprühkopf am Eingang des Gehörgangs an und sprühen Sie ein bis zweimal in jedes Ohr. Halten Sie die Sprühflasche dabei aufrecht.
2. Massieren Sie den Ohrenansatz einige Sekunden lang.

3. Neigen Sie den Kopf zur Seite, um überschüssige Flüssigkeit auslaufen zu lassen und abzuwischen.
4. Spülen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser.

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei Mittelohrentzündung, Trommelfellperforation und im Allgemeinen Personen, die eine Vorgeschichte mit Ohrenleiden (Schwindel, medizinische oder chirurgische Eingriffe ...) haben oder hatten.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch

Wenden Sie sich bei Fragen oder Schmerzen vor dem Gebrauch des Produkts an Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn sich bereits ein Ohrenschmalzpfropfen gebildet hat, kann AUDISPRAY ADULT zur Aufquellung des Pfropfens führen und Schmerzen verursachen. Suchen Sie in diesem Fall bitte Ihren Arzt auf.


Es wird empfohlen, AUDISPRAY ADULT im Laufe des Jahres nach der ersten Anwendung aufzubrauchen. Überschreiten Sie nicht das auf der Verpackung und der Flasche angegebene Haltbarkeitsdatum.

Alle schwerwiegenden, mit AUDISPRAY ADULT zusammenhängenden Zwischenfälle müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes gemeldet werden, in dem der Benutzer wohnhaft ist.

AUDISPRAY ADULT ist ein Medizinprodukt, konform mit der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG

AUDISPRAY

ADULT 12+

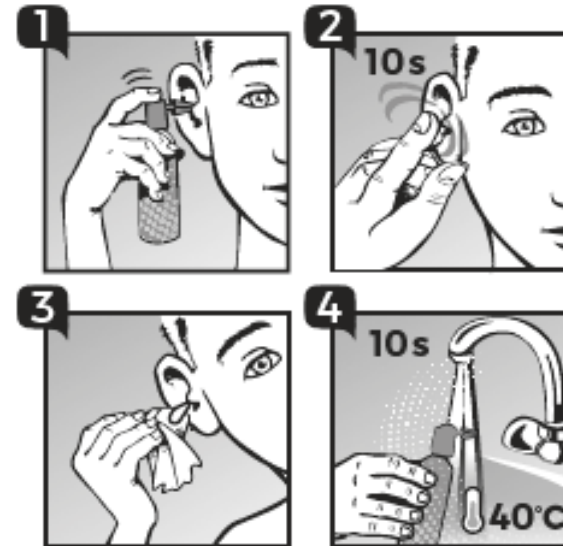

Laboratoires DIEPHARMEX S.A.
Avenue Rosemont 8
1208 Geneva SWITZERLAND
Tel.: +41 (0) 22 718 64 20
Info@diepharmex.com



ASA.NOT10.2018-REV3
DI5499